


# Euthanasiezange

Für die schnelle Erlösung von  
leidenden kleinen Nutztieren

## Legende:

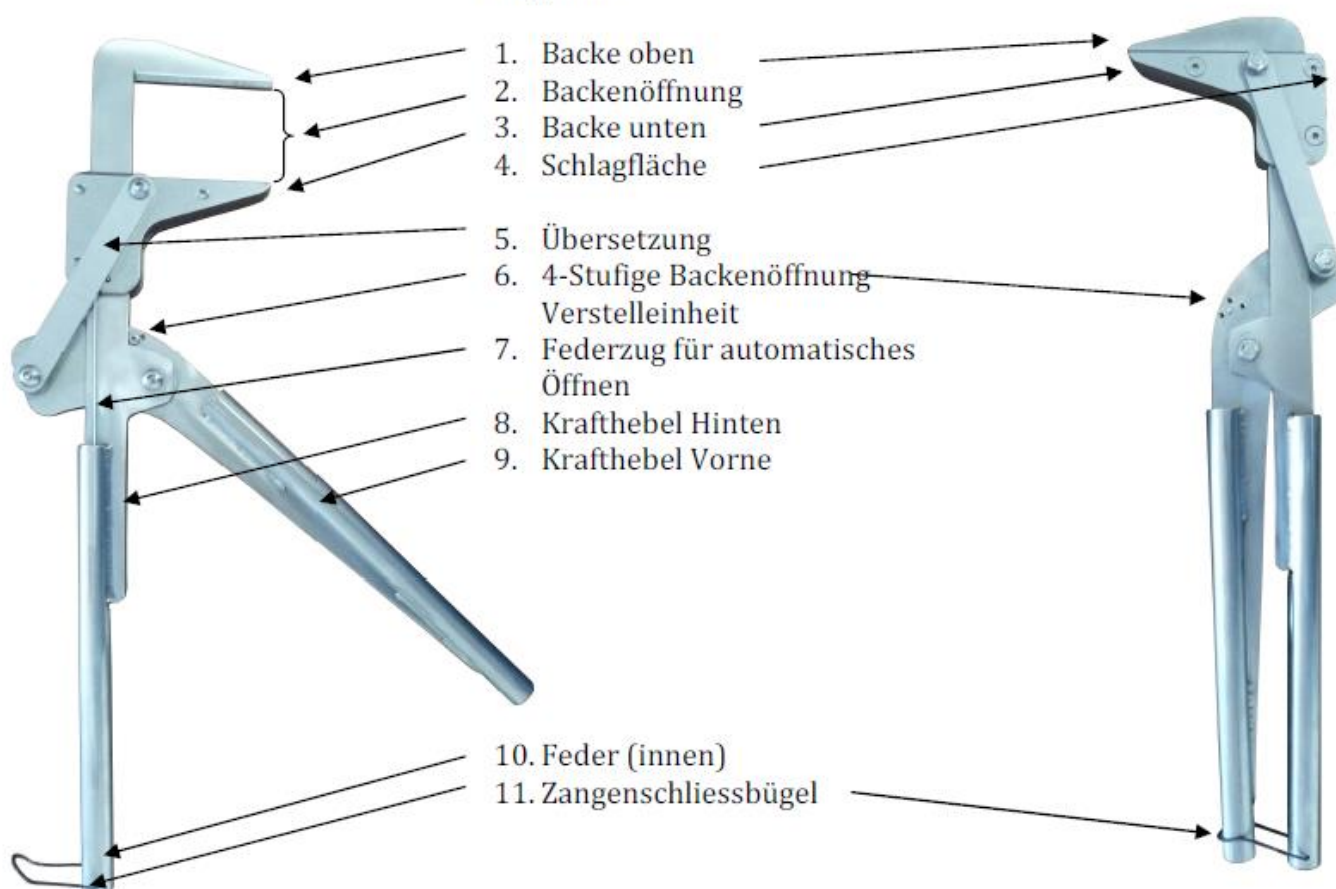





## Allgemein

Leidende, zu eliminierende kleine Nutztiere müssen nach einem Fachgerechten Standard vom Tierbetreuer im Stall schnell und zuverlässig erlöst werden können. Mit dieser Zange ist dies möglich, da beim Quetschen der Halswirbelsäule (bzw. Halswirbeldislokation) das Zentralnervensystem durchtrennt wird.

## Vorgehensweise

Arbeiten Sie mit der Zange ruhig und konzentriert und befolgen Sie die nachfolgenden Schritte:

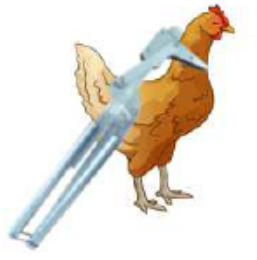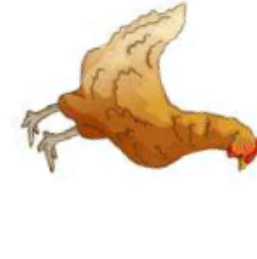
1		<p>Halten Sie das zu eliminierende Kleintier mit einer Hand fest und geben Sie mit der Rückseite der Zange einen Betäubungsschlag auf den Hinterkopf. Die Haut sollte dabei nicht verletzt werden.</p>
2		<p>Anschliessend die Zange von oben direkt hinter dem Kopf an die Halswirbelsäule legen.</p>
3		<p>Die Zange muss in der richtigen Position mit einer oder beiden Händen schnell und kräftig zusammengedrückt werden und noch ca. 10 Sekunden geschlossen bleiben.</p>
4		<p>Während weiteren 60 Sekunden muss der Tod des Tieres überprüft werden.</p>

## Wichtig!

Weder bei der «Hammerbetäubung» noch beim Zusammendrücken der Zange sollte die Haut des Tieres verletzt werden. Drosseln der Stärke des Schlages und oder verändern Sie die Position beim Ansetzen am Genick.

## 4 Stufige Backenöffnung Verstell Einheit

Durch das Verstellen der Schraube (siehe Bild) kann die maximale Backenöffnung verstell werden. Diese Einstellungen sind je nach Tier, respektive Durchmesser des Genicks zu verstellen.

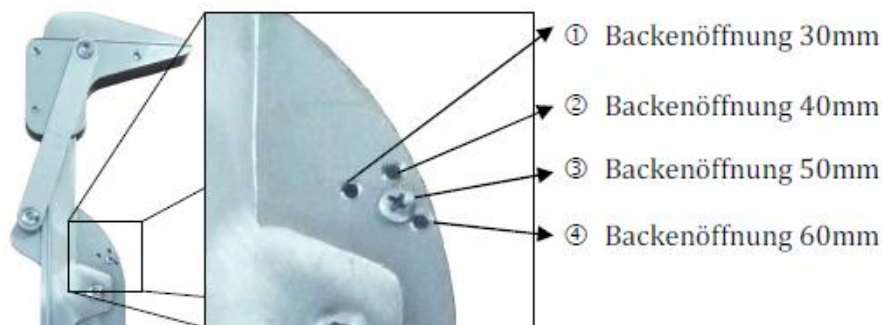

## Sicherheitshinweis

Bevor Sie die Zange zusammendrücken, vergewissern Sie sich, dass keine ungewollten Körperteile oder Fremdkörper zwischen den Backen befinden.

## Wartung und Reinigung

Die Euthanasiezange ist ein Spezialwerkzeug, welches mit den Tieren direkt im Kontakt kommt. Aus diesem Grund ist die Einhaltung der Hygiene zur Verhinderung der Übertragung von krankmachenden Keimen sehr wichtig. Wir empfehlen Ihnen folgende Reinigung:

- Nach jedem Gebrauch:** Die Zange mit heissem Wasser und Reinigungsmittel gründlich waschen
- Gross-Reinigung:** Zange zuerst abwaschen und anschliessend 15 Minuten in heissem Wasser kochen und abkühlen lassen. Anschliessend desinfizieren.
- Ersatzteile:** Bei starker Backenverletzung, sollten Die Backen gewechselt werden.  
(Ersatzteile bei Walder-Technik)

Es empfiehlt sich, die Zange ohne Gross-Reinigung nicht von Stall zu Stall zu transportieren.

## Technische Daten

Gewicht	1.100 Kg
Länge	420 mm
Öffnung der Baken	0 bis 60 mm
Übersetzungsverhältnis	1 : 4.5